

Инструкция по эксплуатации.
ЭКГ – электроды серии Skintact, типов CT, F, FS, PD, T, TS, W и принадлежности к ним типа RT, FIX

Электроды размещаются на теле пациента только врачом или персоналом, производящим снятие ЭКГ.

1. Выберите место размещения в соответствии с рекомендациями для ЭКГ мониторинга или диагностики.
2. Убедитесь в том, что кожный покров сухой, чистый и свободен от чрезмерного волосяного покрова.
3. Подсоедините кабели отведения к электродам.
4. Снимите пластиковую защитную пленку и приклейте электроды к коже.
5. Разгладьте при необходимости пальцем ленту, губку или другие детали.
6. Проведите снятие ЭКГ.
7. Уберите все неиспользованные электроды в оригинальный конверт. Закройте открытый конверт и заверните открытую часть один или два раза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !

С целью минимизации риска нанесения ожогов, используйте только рекомендованные для конкретного вида электрохирургического или мониторингового оборудования параметры при снятии ЭКГ.

Не размещайте электроды на кожный покров имеющий эритему , повреждения или раны любого происхождения.

Не используйте электроды для пациентов с явно выраженной раздражительностью кожного покрова и информируйте производителя в случае наблюдения таких эффектов.

Не используйте электроды при высохшем геле

Не используйте электроды свыше 24 часов
РУ ФСЗ 2011/09805 от 25.05.2011г
Годен до см. на упаковке