

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

**КОМПЛЕКТ
ОПТИЧЕСКИХ
НАСАДОК**

«КОН - Г»

ПАСПОРТ

с техническим описанием и
инструкцией по эксплуатации БПГИ
5.946.002ПС

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Назначение.....	3
2. Комплект поставки... ..	4
3. Технические характеристики.....	5
4. Указания мер безопасности.....	7
5. Порядок работы.....	8
6. Транспортирование и хранение.....	9
7. Свидетельство о приемке.....	10
8. Гарантии изготовителя.....	11

1. Назначение

1.1. Комплект оптических насадок «КОН-Г» БПГИ 5.946.002 (в дальнейшем - насадки) представляет собой набор световодов и используется совместно с магнито-инфракрасными лазерными терапевтическими аппаратами серии «РИКТА».

1.2. Насадки предназначены для расширения функциональных возможностей магнито-инфракрасного лазерного терапевтического аппарата путем доставки излучаемой мощности светового потока непосредственно в полостные органы пациента и может использоваться при выполнении лечения в гинекологии, в том числе:

- насадка 1 Г - для лечения эрозий шейки матки;
- насадка 2 Г - для лечения поражений влагалища (вульвовагинит, вагиноспазм и т.п.);
- насадка 3 Г - для лечения поражений влагалища в условиях сохранности девственной плевы (по результатам предварительного гинекологического осмотра);
- насадка 4 Г - для лечения заболеваний наружных половых органов (бартолинит и т.п.);
- насадка 5 Г - для лечения заболеваний молочных желез (поражений в области соска).

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

2. Комплект поставки

2.1. Насадки поставляются в составе, приведенном в табл.1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1. Оптическая насадка 1Г	БПГИ7.946.004	1
2. Оптическая насадка 2Г	БПГИ7.946.005	1
3. Оптическая насадка 3Г	БПГИ7.946.006	1
4. Оптическая насадка 4Г	БПГИ7.946.007	1
5. Оптическая насадка 5Г	БПГИ7.946.008	1
6. Паспорт	БПГИ7.946.002ПС	1
7. Футляр		1

2.2. Внешний вид насадок приведен на рис.1.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

3. Технические характеристики


3.1. Насадки изготовлены из нетоксичного оптического органического стекла, пропускающего световой поток диапазона 300-1000 нм.

3.2. Поверхности насадок отполированы, что исключает возможность нанесения травмы пациенту во время лечебной процедуры, уменьшает боковое излучение, облегчает их дезинфекцию.

3.3. Импульсная мощность лазерного излучения на наконечниках насадок не менее 2 Вт.

3.4. Габаритные размеры насадок (мм), направления световых излучений приведены на рис.1.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

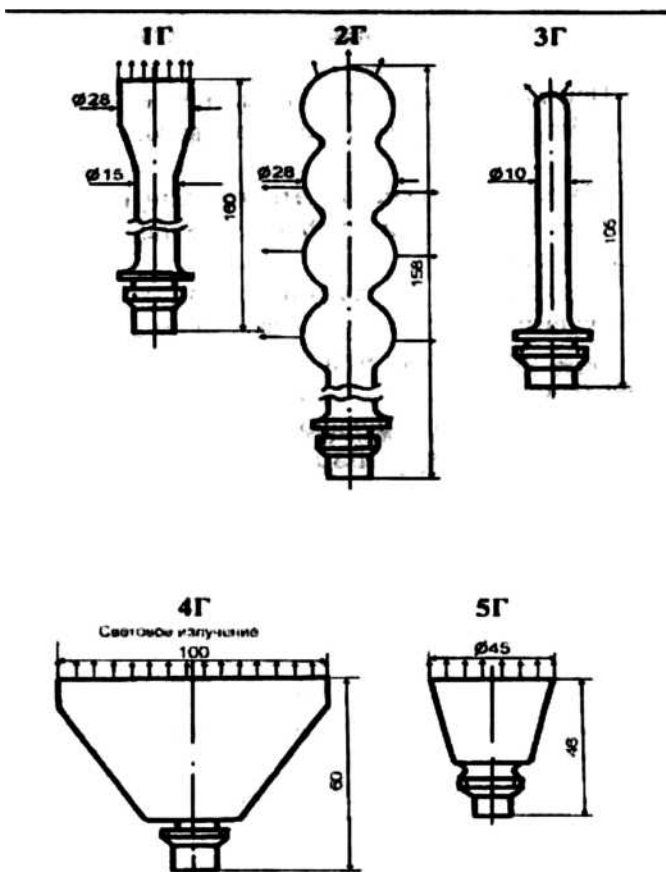

**Рис.1. КОМПЛЕКТ ОПТИЧЕСКИХ НАСАДОК К
МАГНИТО-ИНФРАКРАСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ АППАРАТУ**

4. Указания мер безопасности

4.1. При работе аппарата с применением насадок медработнику рекомендуется надевать защитные очки.

4.2. Очки не должны иметь трещин и сколов светофильтров, других дефектов, ухудшающих их защитные свойства.

4.3. Установка и смена насадок должна производиться только при выключенном, аппарате.

4.4. Запрещается направлять излучающие поверхности насадок в сторону глаз.

4.6. При замутнении поверхностей насадок, либо появлении мелких царапин рекомендуется отполировать поврежденные участки войлоком с пастой ГОИ с последующей дезинфекцией.

1. Порядок работы

1.1. Взять терминал аппарата и повернуть излучателем вверх.

1.2. Взять необходимую для данной процедуры насадку и до упора ввинтить в резьбовое отверстие втулки терминала. Продезинфицировать насадку 70% спиртом.

Во избежании повреждения резьбы не прикладывать значительных усилий при завинчивании.

1.3. При использовании насадок 1Г, 2Г, 3Г надеть на них презерватив.

1.4. Дальнейший порядок работы изложен в соответствующем разделе паспорта на аппараты серии «РИКТА»

1.5. Лечебное воздействие с использованием комплекта оптических насадок «КОН-Г» следует осуществлять в соответствии с разделом 4.8. «Методических рекомендаций по применению», при этом:

-для насадок 1Г, 2Ги 3Г руководствоваться схемами приведенными для режимов с применением насадки

№1:

- насадкой 4Г воздействие на зону лечения производить на частотах 1000Гц и 50Гц последовательно по 2 мин соответственно;

- насадкой 5Г воздействие на область сосков производить на частотах 50Гц и 5Гц последовательно по 2 мин соответственно.

1.1. Вывинтить, продезинфицировать насадку 70% спиртом и уложить в футляр.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

6. Транспортирование и хранение

2.1. Транспортировка комплекта насадок допускается любым транспортом и на любые расстояния в штатной упаковке, предохраняющей насадки от сильных ударов, тряски и вибрации, которые могут ухудшить качество оптических поверхностей.

2.2. Хранение насадок следует производить в штатной упаковке в помещении при температуре +10°...+30°С и влажности до 80%.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

3. Свидетельство о приемке

Комплект оптических насадок «КОН-Г» признан
годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ___ » 02 200 7 г.

Подпись лица, ответственного за приемку

М.П.




(подпись)