


Стол массажный складной КСМ – С1

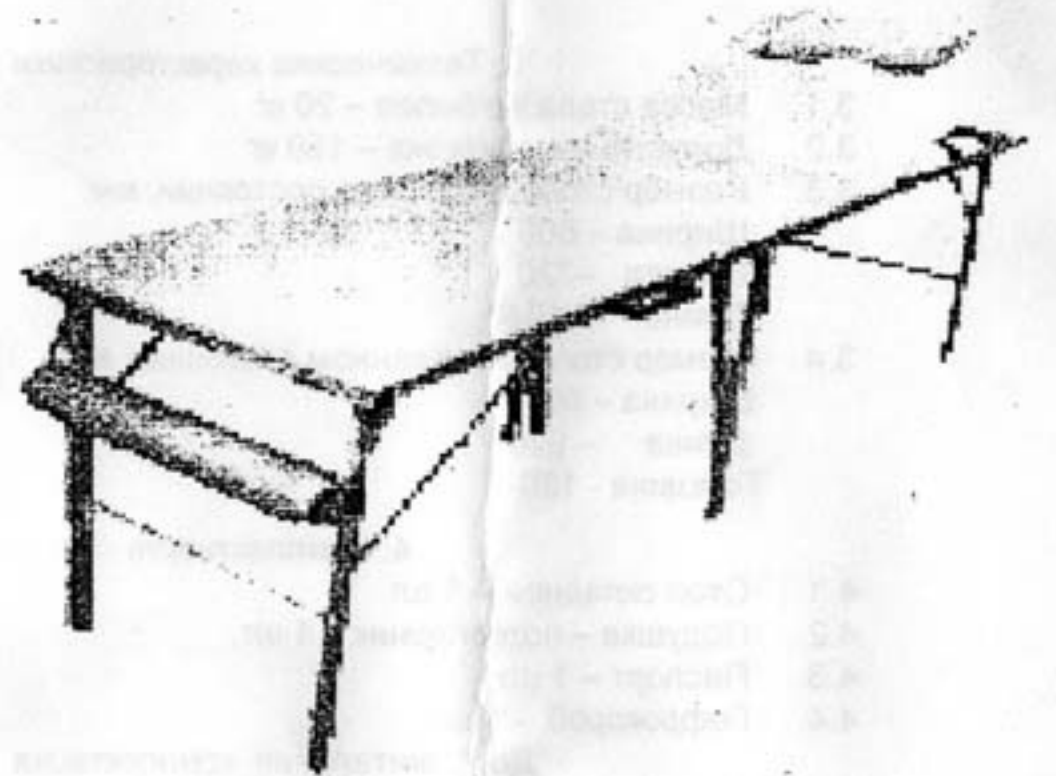

Штамп ОТК



Дата выпуска и упаковки

14 МАЙ 2007

Дата продажи

10.01.08.

Подпись продавца

[Handwritten signature]



Изготовлено в России ООО «Мед Инжиниринг»

ПАСПОРТ

Стол массажный складной КСМ-С1

1. Назначение

- 1.1. Стол массажный складной предназначен для оснащения учреждений здравоохранения, массажных и косметических салонов.

2. Описание

- 2.1. Стол изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93, 19917-93.
- 2.2. Каркас стола выполнен из тонкостенных стальных труб с нанесением полимерного порошкового покрытия.
- 2.3. Мягкие элементы выполнены из фанеры, поролона и обтянуты искусственной кожей. В спинке стола имеется отверстие для лица.
- 2.4. Стол поставляется в собранном виде.

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса стола не более – 20 кг
- 3.2. Допустимая нагрузка – 150 кг
- 3.3. Размер стола в рабочем состоянии, мм:
Ширина – 600
Высота – 720
Длина – 1840
- 3.4. Размер стола в собранном состоянии, мм:
Ширина – 600
Длина – 920
Толщина – 120

4. Комплектность

- 4.1. Стол складной – 1 шт.
- 4.2. Подушка – подголовник – 1 шт.
- 4.3. Паспорт – 1 шт.
- 4.4. Гофрокороб – 1 шт.

Дополнительная комплектация

- 4.5. Штанга бумага держателя с 2-я барашками – 1 шт.
- 4.6. Чехол – 1 шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 3.2.
- 5.2. Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Растворитель не применять!

6. Хранение и транспортирование

- 6.1. Транспортирование стола на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до +40°C.
- 6.2. Стол может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до +40°C.
 - относительная влажность при температуре окружающей среды +25°C не более 80%.
 - отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение трех лет, при соблюдении условий транспортировки, хранения, и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев с даты продажи изделия.
- 7.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.
- 7.4. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
г. Москва, ул. Буракова, д.2, тел. 366-04-88, 365-43-52
- 7.5. Доставка производится покупателем.

8. Примечание

- 8.1. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные потребительские свойства.

