

**Заказать данный товар Вы можете на сайте  
ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)**

## ЭТИКЕТКА ЦТ198.10.000

### Парогаситель ЦТ 198.10. 000

#### Назначение. Устройство Принцип работы.

Для предотвращения непосредственного сброса в канализацию из стерилизатора отработанного водяного пара и горячего конденсата стерилизатор комплектуется парогасителем.

Конструкция парогасителя представляет собой сосуд цилиндрической формы емкостью 12 литров.

Устройство парогасителя указано на рис.

К сосуду подводится холодная водопроводная вода и отработанный пар от стерилизатора. Поступающий в парогаситель пар и горячий конденсат смешивается с проточной холодной водой, охлаждается до приемлемой температуры (60-70 С) и сбрасываются в канализацию

Парогаситель устанавливается в помещении на полу возле стерилизатора в удобном месте и подсоединяется к соответствующим патрубкам стерилизатора, канализации через разрыв и водопроводу. Для нормальной работы парогасителя через него должна проходить проточная водопроводная вода в незначительных количествах (не менее 1 л/мин.)

#### Технические характеристики

1. Температура пара на входе в парогаситель, не более —135°С
2. Температура сброса с канализацию воды, не более — 70°С
3. Масса, не более — 5 кг

