

**ВНИМАНИЕ! В ПК, ПРИОБРЕТЁННЫХ В КОМПЛЕКТЕ С АППАРАТОМ,
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЖЕ УСТАНОВЛЕНО И ГОТОВО К РАБОТЕ!!!**

**Инструкция по инсталляции программного обеспечения.
Программа «Урология» (прибор АМВЛ-01, АЭЛТИС, УФ-01)
(На новый ПК или при сбоях программы)**

Для ОС «VISTA», W-7, W-8

1. Вставьте установочный диск «Программа УРОЛОГИЯ» в ПК, после появления установочного окна нажмите кнопку «Установить». Программа УРОЛОГИЯ автоматически установится на Ваш компьютер (в случае, если в процессе возникнут сообщения о невозможности установки каких-либо файлов, **соглашайтесь с их неустановкой**).

Для ОС «Win.- XP»

2. Вставьте установочный диск «Программа УРОЛОГИЯ» в ПК, после появления установочного окна нажмите кнопку «Предустановка», соглашайтесь со всеми предложениями мастера установки. После успешного завершения предустановки нажмите кнопку «Установить». Программа УРОЛОГИЯ автоматически установится на Ваш компьютер (в случае, если в процессе возникнут сообщение о невозможности установки каких либо драйверов или файлов, соглашайтесь с их неустановкой).

3. Подключите (поочередно) USB разъемы к аппаратам и ПК соответственно , после чего в правом нижнем углу экрана появится сообщение о том, что соответствующее оборудование **установлено и готово к использованию**.

4. Если в процессе инсталляции Мастер установки потребует найти драйвер, для обнаруженного устройства укажите имя диска, на который установлена программа Урология, например с:\.

Для ОС VISTA и Win-7 драйвера устройств (если они не установятся автоматически) необходимо устанавливать через Диспетчер устройств в автоматической установке с данного компьютера указав путь - имя диска, на который установлена программа Урология, например с:\ ()**

5. После установке ПО для принтера (аппарата УФ-01) выберите качество печати - «Быстрая черновая печать».

6. В режиме Настройка установите значения соответствующих параметров как показано на рис. 1, 2,3.

(**) Зайти в **Диспетчер устройств** (одновременно на клавиатуре нажать значок Win (в виде Win-флага) и

кн. Pause), **далее - Другие Устройства** и убедиться, что устройство Yarovit ... device подкрашено желтым

цветом, это значит, - драйвера нет. Далее щелкнуть по этому Устройству - Драйвер и далее,- Обновить драйвер. Путь указать как имя диска на котором установлена программа УРОЛОГИЯ например C:\. Через несколько минут машина найдет этот драйвер на диске C сама и сообщит об успешной установке последнего.

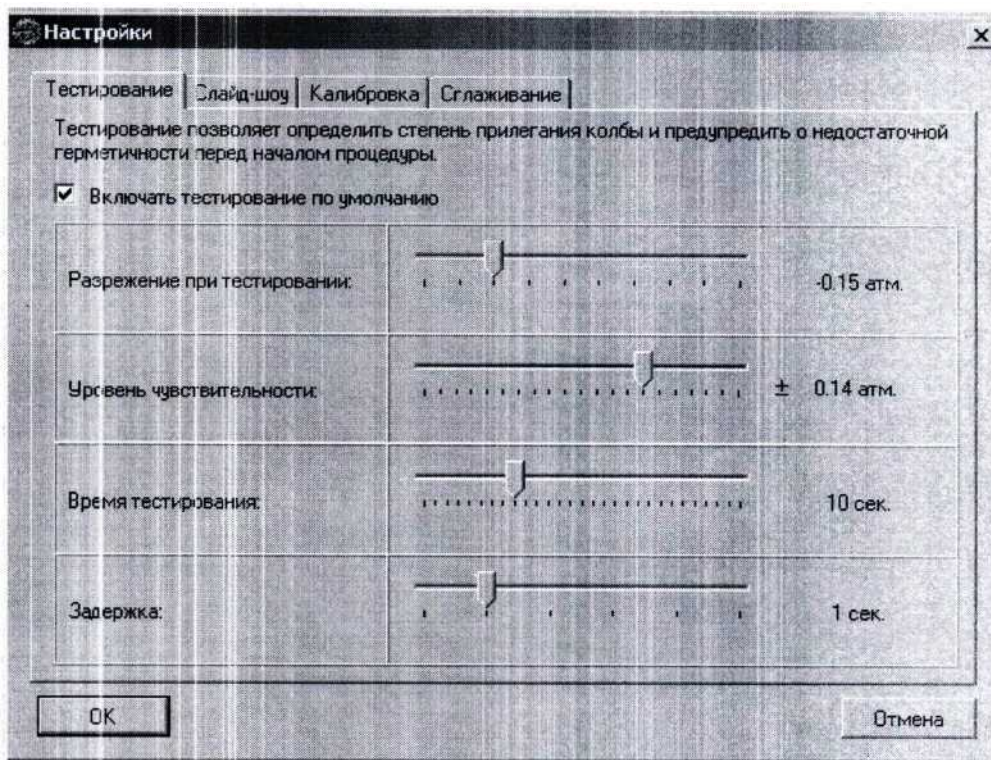


Рис.1 Начальный установки Тестирования (для АМВЛ-01)

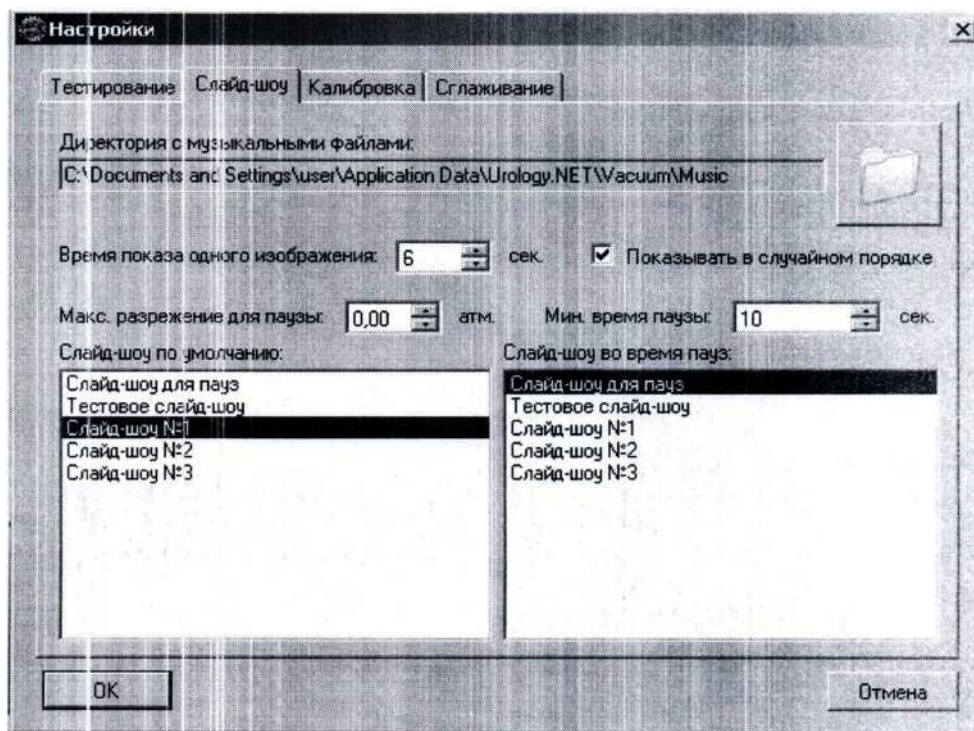


Рис.2 Начальный установки Слайд-шоу (для АМВЛ-01)

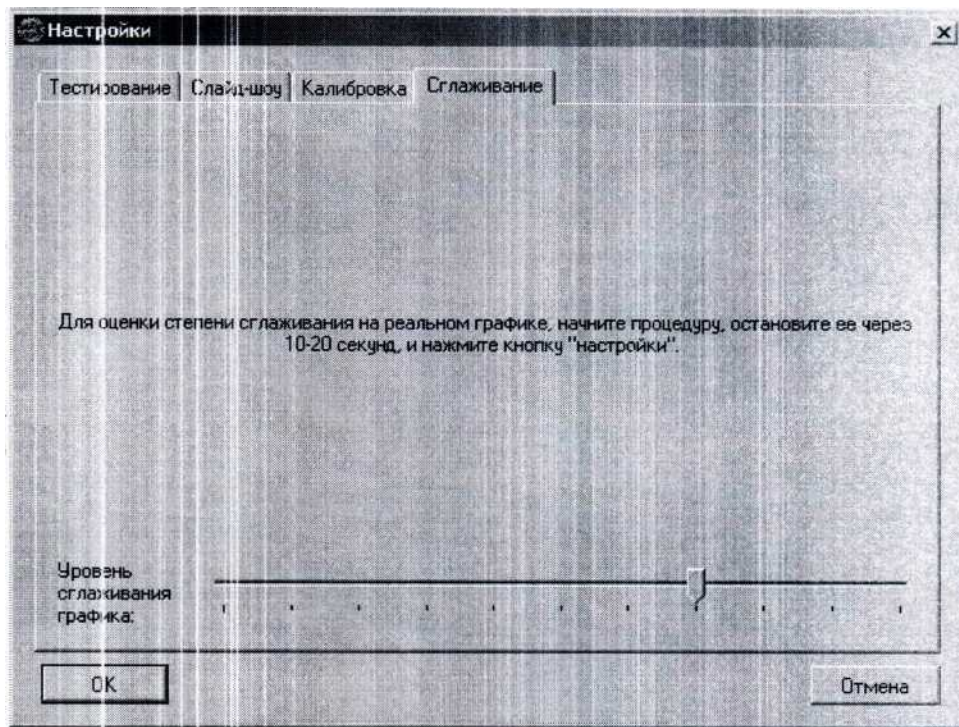


Рис.3 Начальный установки Сглаживание (для АМВЛ-01)