


Заказать универсальную манжету вы  
можете на сайте ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

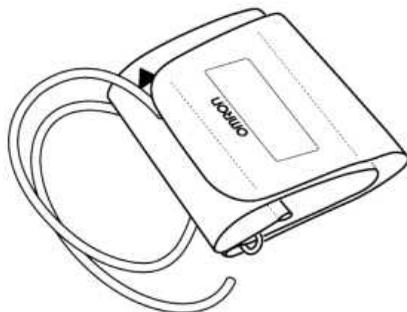

## **CW Wide Range Cuff**

**Универсальная манжета**

- *Инструкция для пользователя*

**Заказать универсальную манжету вы  
можете на сайте ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)**

**OMRON**

Универсальная манжета CW Wide Range Cuff (HEM-RML30)



Благодарим Вас за покупку универсальной манжеты OMRON. Манжета предназначена для пользователей с окружностью руки от 22 до 42 см. Универсальную манжету OMRON можно использовать с различными тонометрами OMRON. См. руководство по эксплуатации, которое идет в комплекте к Вашему прибору для измерения артериального давления. Определите, какой штекер следует использовать с данным прибором. Присоедините соответствующий воздушный штекер к воздушной трубке.



**Прежде чем использовать прибор, внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Сохраните ее для получения необходимых сведений в будущем.**




- Данную манжету используйте только с подходящими приборами для измерения артериального давления.
- Не стирайте манжету и не допускайте ее намокания.

### Инструкция для пользователя

**Вставьте левую руку в петлю манжеты.**


1.

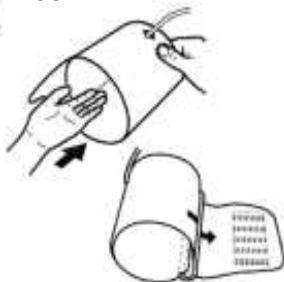

**Примечание:** Если манжета не собрана, проденьте дальний от воздушной трубки край манжеты через металлическое кольцо. Застежка «липучка» должна оказаться с внешней стороны образовавшегося цилиндра.

**Правильно расположите руку.**

2.

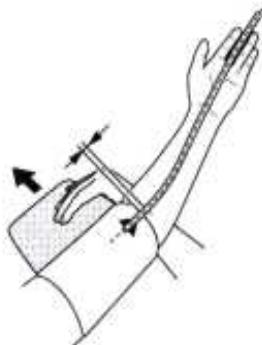

- 1) Воздушная трубка должна быть направлена вниз вдоль предплечья и находиться на одной линии со средним пальцем.
- 2) Нижний край манжеты должен находиться на 1-2 см выше локтевого сгиба.
- 3) Наложите манжету на плечо таким образом, чтобы метка (стрелка под трубкой) оказалась посредине внутренней части руки и была направлена на средний палец.

**Примечания:**

- Не накладывайте манжету поверх плотной одежды и не закатывайте рукав, во избежание пережатия артерии.
- Расположите манжету на уровне сердца (на уровне груди). При необходимости подложите под руку подушку.

**Заказать универсальную манжету вы  
можете на сайте ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)**



**Измерения на правой руке**

Манжету следует накладывать таким образом, чтобы воздушная трубка находилась со стороны локтя.

- Следите за тем, чтобы трубка не оказалась под рукой, не препятствовала току воздуха.
- Край манжеты должна находиться на 1-2 см выше локтевого сгиба.

1. Наложите манжету на руку ПЛОТНО, но не слишком туго. Надежно застегните застежку-липучку.

3.



**Уход**

- Осторожно удаляйте пятна на манжете тканью, смоченной мыльным раствором.
- Не сворачивайте манжету или воздушную трубку слишком плотно и не сгибайте их.
- Не храните манжету в следующих условиях:
  - В местах, где она может намокнуть.
  - В местах, подверженных воздействию высокой температуры, влажности, прямого солнечного света, а также в местах скопления пыли и коррозионных испарений.
  - В местах, подверженных вибрации, сотрясениям, или там, где она может упасть.

**Технические характеристики:**

Наименование	Манжета для измерителей артериального давления и частоты пульса OMRON
Модель	CW Wide Range Cuff (HEM-RML30)
Размер	151 мм x 563 мм
Допустимое давление	0-299 мм рт. ст.
Срок гарантии, службы	1 год при условии использования манжеты 5 раз в день

Эта манжета удовлетворяет положениям директивы ЕС 93/42/E ЕС (Директива о медицинских устройствах).

Сделано в Китае

Данный продукт OMRON изготовлен при строгом контроле качества  
компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., ЯПОНИЯ.