

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

Очки защитные «БИОЛАЗЕР»

Паспорт и инструкция
по эксплуатации

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

Назначение изделия

Очки защитные открытые с боковой защитой регулируемые «БИОЛАЗЕР» (далее — очки) предназначены для защиты от прямого и отражённого лазерного излучения в диапазоне от ультрафиолетовой до ближней инфракрасной (ИК) областей спектра при работе с оборудованием для лазерной терапии, фотодинамической терапии и лазерной хирургии классов лазерной опасности 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B и 4 по ГОСТ Р МЭК 60825-1- 2009, а также с другим фототерапевтическим оборудованием в медицинских учреждениях и лабораториях.

Отличительные особенности:

- универсальные антизапотевающие очки с панорамным обзором;
- боковая и верхняя защита;
- анатомическая регулировка дужек по длине и углу установки;
- дополнительная защита за счёт формы стекла и конструкции дужек;
- защитное покрытие против царапин;
- современный дизайн, удобство хранения и эксплуатации;
- допускается ношение поверх коррекционных очков.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

Технические данные и характеристики

Степень защиты от лазерного излучения для различных длин волн по ГОСТ Р 12.4.254-2010:

Длина волны (нм)	Степень защиты	Длина волны (нм)	Степень защиты	Длина волны (нм)	Степень защиты	Длина волны (нм)	Степень защиты	Длина волны (нм)	Степень защиты	Длина волны (нм)	Степень защиты
350	L2	490	L3	630	L2	770	L2	910	L2	1050	L2
360	L2	500	L2	640	L2	780	L2	920	L2	1060	L2
370	L3	510	L2	650	L2	790	L2	930	L2	1070	L2
380	L4	520	L2	660	L3	800	L2	940	L2	1080	L2
390	L4	530	L2	670	L3	810	L2	950	L2	1090	L2
400	L4	540	L2	680	L3	820	L2	960	L2	1100	L2
410	L4	550	L2	690	L3	830	L2	970	L2		
420	L4	560	L2	700	L3	840	L2	980	L2		
430	L4	570	L2	710	L3	850	L2	990	L2		

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

440	L4	580	L2	720	L2	860	L2	1000	L2
450	L4	590	L2	730	L2	870	L2	1010	L2
460	L4	600	L2	740	L2	880	L2	1020	L2
470	L4	610	L2	750	L2	890	L2	1030	L2
480	L4	620	L2	760	L2	900	L2	1040	L2

Масса, г, не более

50

Габаритные размеры, мм, не более

55x60x150

Комплектность

Очки

1 шт.

Чехол защитный

1 шт.

Паспорт с инструкцией по эксплуатации

1 шт.

Указания по эксплуатации Извлечь очки из защитного чехла.

Проверить защитный фильтр на наличие трещин. При их наличии пользоваться очками запрещается. При наличии загрязнений протереть защитный фильтр мягкой тканью.

Отрегулировать очки по размеру головы при помощи изменения длины дужек и угла установки.

Очки необходимо содержать в чистоте и беречь от механических повреждений. После эксплуатации поместить в защитный чехол.