



Wee Sight™

Транскутанный определитель сосудов

Инструкция по использованию прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: светодиодное излучение. НЕ смотрите на луч.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Не опускайте прибор в какие-либо жидкости
- Не размещайте рядом с прибором жидкости
- Не смешивайте различные типы батареек. При замене, используйте только щелочные AA батарейки.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При возникновении неисправности светодиода и/или кнопки включения/выключения, прибор выбрасывают.
- Прибор уничтожается в соответствии с местными нормами и инструкциями.
- Чистка прибора выполняется в соответствии с нормативами больничного протокола.
 - Заменяйте батарейки при снижении эффективности функционирования прибора.
- Компания Respiropics, Inc. рекомендует одновременно заменять две батарейки.

1. Вставьте батарейки
2. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения, расположенную на задней стороне прибора.
3. Положите прибор на плоскую поверхность или держите в руке, затем сверху прибора и светодиода положите руку пациента ладонью вниз.
4. Для улучшения визуализации, приглушите свет в помещении.
5. Вставьте IV катетер, затем выключите прибор.

