

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

## **Инструкция по применению и хранению подушки кислородной “Meridian”**

### **Назначение**

Предназначена для доставки и подведения кислорода больному как в условиях стационара, так и в условиях выездной скорой помощи, а также в домашних условиях.

### **Общие указания**

1. Наполнение подушек должен производить только обученный медицинский персонал в следующей последовательности:

- установить зажим подушки в положение "открыто";
- расположить подушку перед редуктором баллона так, чтобы не было зажимов на трубке;
- надеть раструб воронки на трубку;
- наполнять подушку кислородом при давлении не более 10 кПа;
- установить зажим подушки в положение "закрыто", закрыть трубку заглушкой.

1. Перед подачей кислорода больному маску обработать тампоном, смоченным в 3% растворе перекиси водорода.

- соединить маску с трубкой подушки;
- приложить маску к лицу;
- установить зажим подушки в положение «открыто»;
- скорость поступления кислорода регулируется зажимом на трубке и надавливанием на подушку с ее угла;
- при использовании подушки соблюдать схему дыхания рекомендованную лечащим врачом;
- при неполном использовании кислорода установить зажим подушки в положение «закрыто», закрыть трубку заглушкой.

### **Меры безопасности**

1. При наполнении подушки кислородом не допускается попадание масла на поверхность баллона и подушки, соприкасающейся с кислородом.

2. При заполнении подушки не превышать давление 10 кПа, это может привести к повреждению подушки.

3. Участок помещений: предназначенный для наполнения подушки кислородом должен быть изолирован от спальных помещений.

4. Длительное без перерывов пользование кислородными подушками может привести к нежелательным осложнениям.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

#### Хранение

Рекомендуется заполнять подушку кислородом непосредственно перед применением. Кислород может храниться в подушке в течение 10 дней. Хранить в темном месте при температуре от 1 до 25°C и относительной влажности воздуха 65-80% в расправленном состоянии на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить в одном помещении с горючесмазочными веществами, кислотами, щелочами и другими веществами, разрушающими резину.

Комплектность Подушка кислородная -1 шт.

Маска для дыхания -1 шт.

Инструкция по применению и хранению -1 шт.

Дата изготовления - 05.2014

Срок годности - 3 года с даты изготовления.

Гарантийный срок - 2 года со дня продажи в пределах срока годности.