


Заказать и купить данный товар можно на сайте www.medrk.ru

ПЛАНТОГРАФ

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы.

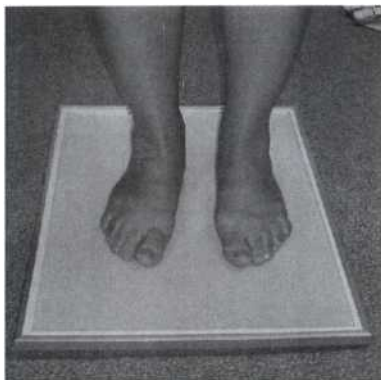

1.2 Плантограф выпускается в соответствии с ТУ 9425-160-01894927-2002.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.2 Используемые материалы: ПВХ 8 мм ГОСТ 17622-72, нержавеющая сталь 12X18Н10Т ГОСТ 5949-75, алюминий анодированный плёнка полиэтиленфталоновая ТУ 2255-466-05761784-2002, трикотажная ткань с клеевым покрытием арт. 376-160 (376-220)

или ткань льняная ГОСТ 5665-77, соответствует ГОСТ Р ИСО 10993-99.

1.3 Габаритные размеры: 440 x 375 Ш 19, 6 ± 0, 5мм.

1.4 Масса плантографа - 2, 1 ± 0, 1 кг.

В комплект поставки входят:

- Плантограф	-1 шт.
- Ванночка	-1 шт.
- Валик	-1 шт.
- Паспорт	-1 экз.
- Этикетка	-1 шт.
- Бумага А3	-50 лист.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1.5 Провести расконсервацию комплекта, его осмотр и проверку комплектности согласно п. 3.

1.6 Между рамкой и тканью для каждого больного должен вкладываться чистый лист бумаги (лучше - белой) размерами 40х30 см.

1.7 При помощи валика (или губки) на полотно должен быть нанесен слой типографской или штемпельной краски.

1.8 Перед каждым использованием плантографа и в процессе дальнейшей эксплуатации поверхность плёнки плантографа должна быть подвергнута дезинфекции методом двукратной протирки салфеткой смоченной трёхпроцентным раствором перекиси водорода

(при температуре не менее +18С) и с интервалом между протирками - 15 минут по ОСТ 42-21-2-85.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Плантограф устанавливается около больного. Больной усаживается и ставит свои стопы на плёнку по оси плантографа. После этого больному разрешают медленно подняться (не сходя с места) с равномерным упором на обе стопы. В таком положении производится обвод стопы карандашом. Больной опять медленно усаживается и убирает ноги с плёнки.

Затем открывают рамку плантографа и извлекают лист бумаги с отпечатком стопы.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плантограф соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заказать и купить данный товар можно на сайте www.medrk.ru

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.9 Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

1.10 Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня реализации; гарантийный срок хранения 1-год.

1.11 В течении гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путём бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей)

1.12 Предприятие изготовитель не несёт ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

1.13 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта.

9. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

1.14 Плантограф упакован для условий хранения 2(С): ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-4 по ГОСТ 9. 014-78.

1.15 На время хранения плантограф должен быть уложен в упаковку предприятия изготовителя и храниться в закрытых помещениях при температуре от +2С до +25С в упаковке предприятия изготовителя, а в условиях эксплуатации может храниться без упаковки.

1.16 Воздух помещения, в котором храниться плантограф, должен содержать нормальную влажность и не иметь коррозионно-активных примесей.