



**ЧАСЫ ПРОЦЕДУРНЫЕ  
РВ-1-30  
ПАСПОРТ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU.АИ18.Н09229**

Срок действия с 07.03.2006 по 06.03.2009

**4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1. К работе по монтажу часов допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и обученные правилам безопасности.

4.2. При монтаже должна обеспечиваться защита от случайного прикосновения к электрическим выводам часов.

**5. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

5.1. Для установки требуемой выдержки времени повернуть рукоятку-указатель по часовой стрелке до 25 – 30 мин, а затем установить рукоятку-указатель на нужное значение.

5.2. Отключить часы до окончания установленной выдержки времени можно вручную, повернув рукоятку-указатель против часовой стрелки до нулевого положения.

5.3. Запрещается поворачивать рукоятку-указатель за пределы, установленные шкалой.


**6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

6.1. Часы процедурные РВ-1-30 соответствует требованиям ТУ 25-07.1350-77 и признаны годными для эксплуатации.

Март-07

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп

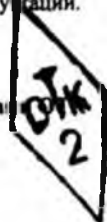

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

1.1. Часы процедурные РВ-1-30 (в дальнейшем - часы) предназначены для отключения физиотерапевтической аппаратуры с подачей звукового сигнала по окончании установленной выдержки времени.

1.2. Часы являются комплектующим изделием.

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. Диапазон выдержки времени от 2 до 30 мин.

2.2. Коммутируемый переменный ток при напряжении до 220 В с частотой 50 (60) Гц – не более 5 А.

2.3. Коммутируемый постоянный ток при напряжении до 220 В – не более 2,5 А.

2.4. Продолжительность звукового сигнала - от 6 до 20 с.

2.5. Относительная погрешность выдержки времени (отключения) - в пределах  $\pm 8\%$

2.6. Условия эксплуатации часов:  
температура окружающего воздуха - от 1 до 60 °С;  
относительная влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре 25 °С.

2.8. Габаритные размеры - не более 82 x 82 x 90 мм.

2.9. Масса часов – не более 0,32 кг.

2.10. Средний полный срок службы - не менее 10 лет.

2.11. Содержание драгоценных материалов:  
серебра – 0,16954 г

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1. Комплект поставки:

часы – 1 шт.;

коробка – 1 шт.

паспорт – 1 экз.

**7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие часов требованиям ТУ 25-07.1350-77 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода часов в эксплуатацию.

7.3. Гарантийный срок хранения часов – 12 месяцев с момента изготовления.

**8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

8.1. Часы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

8.2. Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

8.3. Транспортирование часов в упаковке предприятия-изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или в контейнерах.