

электроды электрокардиографические хлорсеребрянные грудные

Внимание! При работе с электродами и их хранении категорически запрещается:

- после окончания работы оставлять на электродах электродную пасту;
- использовать в качестве контактной среды вещества, которые содержат в себе элементы, реагирующие с серебром*;
- допускать контакт токосъёмной поверхности с резиной;
- хранить электроды в помещениях, насыщенных химически агрессивными парами (сероводород, кислоты и др.);
- применять для очистки электродов острые предметы (скальпели, иглы, пинцеты и др.);
- подвергать ударам и другим механическим воздействиям токосъёмную поверхность электродов.

***При работе с электродами в качестве контактной среды использовать электродные гели, предназначенные для хлорсеребряных электродов, или физраствор.**