

Приобрести Ремкомплект к ингалятору Альбеда можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrkr.ru

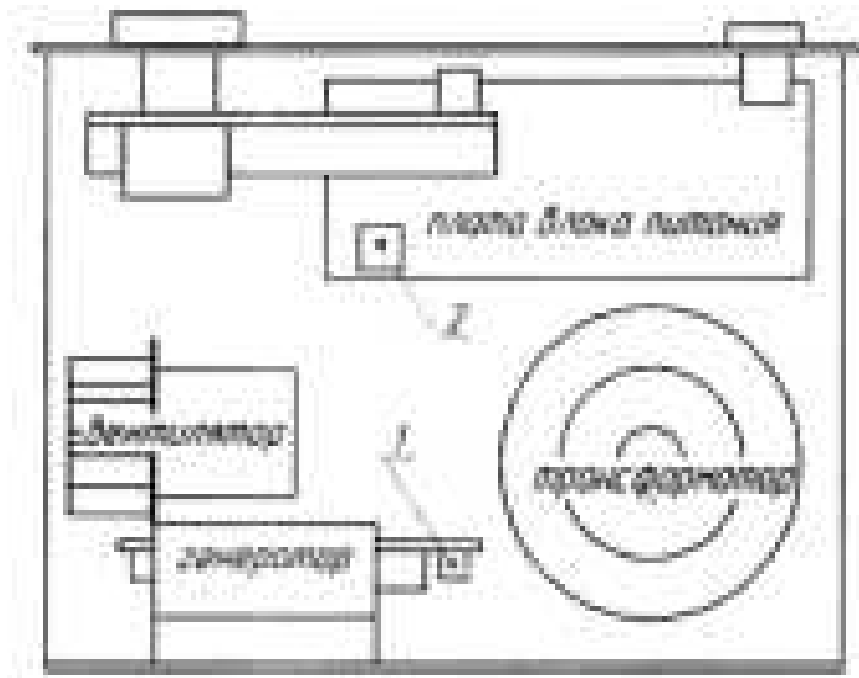


Рис.2 Вид сверху на прибор со снятыми крышкой и задней панелью

9. Установите новую плату генератора на место снятой, предварительно смазав место контакта платы с дном теплопроводящей пастой КТП-8.
10. Подключите плату генератора к блоку питания через разъем 2 как показано на рисунке 2.

Приобрести Ремкомплект к ингалятору Альбедо можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medr.ru


ЗАМЕНА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ИНГАЛЯТОРАХ АЛЬБЕДО

11. Отогните 4 лепестка, крепящие его к крышке, и снимите неисправный излучатель, используя для этого отвертку или скальпель.

12. Очистите кольцевую выдавку 3 (см. рис.3) на крышке прибора от остатков старого герметика и обезжирьте поверхность спиртом или ацетоном. Обезжирьте также сопрягаемую поверхность 4 нового УЗ излучателя.

13. Нанесите герметик на поверхность кольцевой выдавки. Установите УЗ излучатель на крышку, и плотно прижав его, загните 4 лепестка

Обратите внимание на правильность положения излучателя относительно патрубка (см.рис.3)

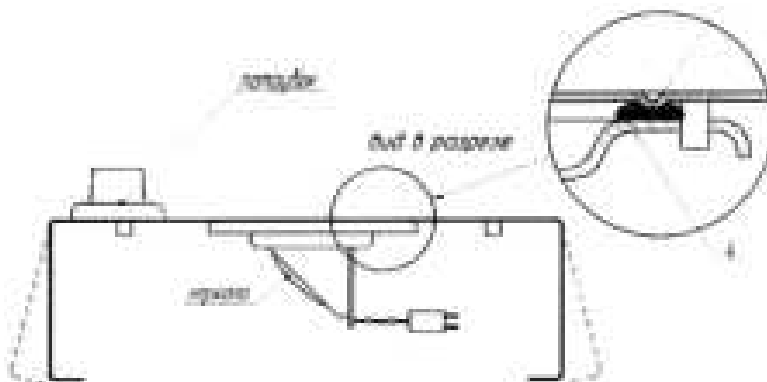

прибор (см. рис.1).

15. Переверните прибор вверх дном и закрепите 4 винтами крышку с

16. Подсоедините разъем излучателя к генератору таким образом, чтобы

17. После отверждения герметика (3-4 часа) проверьте работоспособность ингалятора в соответствии с инструкцией по эксплуатации

18. Установите на место заднюю панель и закрепите ее винтами

Приобрести Ремкомплект к ингалятору Альбедро можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrkr.ru

ЗАМЕНА ПЛАТЫ ГЕНЕРАТОРА АЛЬБЕДРО

Необходимые блоки и материалы :	Необходимые инструменты:
1. УЗ излучатель	1. Отвертка плоская
2. Плата генератора (подобранная и испытанная в паре с УЗ излучателем)	2. Пассатижи
3. КТП-8 - паста теплопроводящая	3. Пинцет
4. Герметик силиконовый	4. Скальпель
	5. Мультиметр

ВНИМАНИЕ! При распаковывании ремкомплекта и при всех манипуляциях с УЗ излучателем избегайте механического воздействия на зеркало (см. рис. 3)

1. Отсоедините ингалятор от сети, вынув шнур из розетки
2. Снимите с ингалятора распылительную камеру и слейте воду из УЗ излучателя, опрокинув прибор над раковиной
3. Отверните 2 винта на задней панели и снимите ее.
4. Отсоедините разъем 1 соединяющий УЗ излучатель и плату генератора (см. рис. 1)

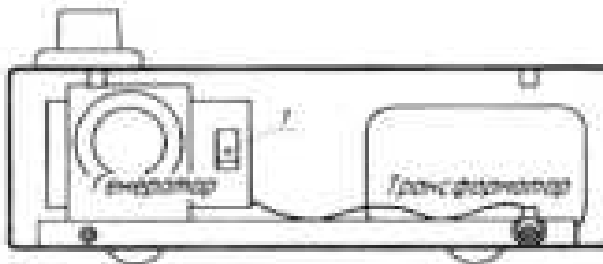


Рис.1 Вид сзади на прибор со снятой задней панелью

5. Переверните прибор вверх дном и отверните 4 винта, которыми крепится к дну крышка ингалятора
6. Переверните прибор в нормальное положение. Разведите в стороны боковые стенки и, приподняв крышку вверх, отсоедините ее от днища