

Заказать данный небулайзер можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru



ДЕЛЬФИН F 1000

**Ингалятор (небулайзер) компрессорный поршневого
типа для аэрозольной терапии модель ДЕЛЬФИН F
1000**

Паспорт

Ингалятор (небулайзер) «Дельфин F1000» производства фирмы «Флаем Нуова» (Италия) используется в домашних условиях, в ингаляториях поликлиник, лечебно - профилактических учреждений, в санаториях. Аппарат должен применяться только в медицинских целях и в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

При необходимости обращайтесь к продавцу.

1. Назначение.

«Дельфин F1000» предназначен для лечения больных бронхолегочными заболеваниями методами аэрозольной терапии.

Обеспечивает получение мелкодисперсных аэрозолей лекарственных препаратов.

2. Технические характеристики аппарата.

№п/п	Наименование показателя	Значение
1.	Напряжение и частота электропитания	230 В ~ 50 Гц
2.	Мощность, потребляемая от сети	140 ВА
3.	Максимальное давление воздуха	2,5 БАР
4.	Производительность компрессора	10 литр/мин.
5.	Габаритные размеры	18 x 30 x 10 см.
6.	Вес	2,1 кг
7.	Максимальное время непрерывной работы	60 мин
8.	Предохранитель	2А/250В
9.	Дисперсность аэрозоля: распылитель "Рapidфлаем 2" - с закрытым отверстием В (режим 1) - с открытым отверстием В (режим 2) распылитель "Рapidфлаем 6 плюс" (режим 3)	0,8 ÷ 2 мкм 2 ÷ 10 мкм 1,53 мкм (в среднем)
10.	Объем заливаемого препарата не более: распылитель "Рapidфлаем 2" распылитель "Рapidфлаем 6 плюс"	7 мл 8 мл
11.08.14	Расход лекарственного препарата: распылитель "Рapidфлаем 2" - с закрытым отверстием В (режим 1) - с открытым отверстием В (режим 2) распылитель "Рapidфлаем 6 плюс" (режим 3)	0,25 мл/мин (прибл.) 0,51 мл/мин (прибл.) 0,42 мл/мин (прибл.)

Аппарат должен эксплуатироваться в помещении в интервале температур от + 10 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха 10% ÷ 95%.

Условия хранения: интервал температуры от -25 °С до +70 °С при относительной влажности воздуха 10% ÷ 95% и атмосферном давлении от 690 до 1060 hPA.

По электробезопасности, электромагнитной совместимости и гигиеническим требованиям аппарат соответствует:

ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ Р 50444-92, стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993

3. Комплектация.

Наименование	Кол-во
Аппарат "Дельфин F1000"	1
Принадлежности:	
Распылитель "Рапидфлаем 2"	1
Загубник с отверстием для распылителя "Рапидфлаем 2"	1
Насадка носовая для взрослых для распылителя "Рапидфлаем 2"	1
Насадка носовая для детей для распылителя "Рапидфлаем 2"	1
Распылитель "Рапидфлаем 6 плюс"	1
Загубник с клапаном для распылителя "Рапидфлаем 6 плюс"	1
Насадка носовая универсальная для распылителя "Рапидфлаем 6 плюс" (вставляется в загубник)	1
Маска лицевая для взрослых	1
Маска лицевая для детей	1
Трубка соединительная	1
Экономайзер (устройство ручного управления распылителем)	1
Входной противопылевой фильтр (вставлен в аппарат)	1
Паспорт, инструкция по эксплуатации	1комл.

Возможна поставка дополнительного количества указанных принадлежностей.

4. Меры безопасности.

- Напряжение сети должно соответствовать 220/230В, 50Гц.
- Перед первым включением и в период срока службы ингалятора проверять шнур электропитания на отсутствие повреждений.
- Не дотрагиваться до штепсельной вилки мокрыми руками и не пользоваться ингалятором при принятии ванны.
- Не закрывать вентиляционные отверстия по обеим сторонам аппарата. Это может привести к перегреву ингалятора.
- При работе ингалятор должен располагаться на твердой свободной поверхности.

5. Меры предосторожности.

- Открытые лекарственные препараты должны быть использованы в возможно короткий срок.
- Во избежание возможного риска передачи инфекции рекомендуется индивидуальное пользование распылителем и другими принадлежностями.
- При проведении процедуры детям и несамостоятельным больным использовать ингалятор под строгим наблюдением взрослых.
- Материалы, применяемые при изготовлении принадлежностей, контактирующих с лекарством, являются специальными полимерами, отличающимися высокой химической стабильностью и устойчивостью. Тем не менее, распылитель и прочие принадлежности необходимо промывать сразу после процедуры, т.к. их длительный контакт с лекарством недопустим.

Внимание! Применение эфирных масел может привести к повреждению распылителя. Предельно допустимая дозировка - 5 капель на 6мл дистиллированной воды.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантийное в течение 5-ти лет со дня продажи и сервисное обслуживание аппаратов «Дельфин F1000»

Производитель, импортер и продавец несут ответственность за сохранность, надежность и работоспособность аппарата «Дельфин F1000» только при условии:

- аппарат используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - сеть электропитания соответствует техническим характеристикам аппарата;
- Производитель имеет право вносить технические и функциональные изменения в конструкцию аппарата без предварительного объявления.

* Для обеспечения максимальной терапевтической эффективности рекомендуется замена распылителя через 6 месяцев при индивидуальном пользовании.

При использовании распылителей в ингалятории замена производится чаще. Необходимо иметь несколько комплектов распылителей и остальных принадлежностей.

Рекомендуется также приобретение запасных противопылевых фильтров.

Гарантийный талон

На ремонт, замену аппарата в течение гарантийного срока.

Внимание: Гарантия на принадлежности к аппарату (распылитель, загубник и т.д.) не распространяется.

Ингалятор «Дельфин F1000»

Заводской номер _____

Дата приобретения _____

Продавец _____ М.П.