

Установка для дезинфекции эндоскопов КРОНТ-УДЭ (устаревшая модель)
Новую модель можно заказать через сайт www.medkr.ru или по тел. (495) 626-57-89



УСТАНОВКА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

УДЭ


- ✦ Установка "КРОНТ-УДЭ" регламентирована для обязательного оснащения эндоскопических кабинетов приказом МЗ РФ № 184 от 16.06.97.
- ✦ Режимы обработки рекомендован инструкцией МЗ РФ №. 11-114/3742 от 10.07.92.
- ✦ Установка УДЭ дополнительно может использоваться для обработки трубок и катетеров.

УСТАНОВКА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЭНДСКОПИЧЕСКАЯ




✦ Установка "УДЭ", укомплектованная набором адаптеров, предназначена для мойки, дезинфекции и стерилизации наружных поверхностей, клапанов управления и функциональных каналов гибких волоконных эндоскопов всех видов полностью и неполностью погружаемых.

АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАННА

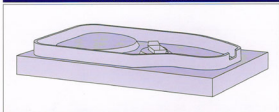

✦ Анатомическая ванна для укладки эндоскопа выполнена из химически стойкого и ударопрочного полистирола.
✦ Конструкция ванны обеспечивает безопасные радиусы изгиба эндоскопа.

СХЕМА РАБОТЫ НАСОСА

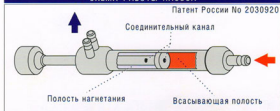

✦ Ручной насос предназначен для подачи растворов в функциональные каналы эндоскопа. Насос выполнен из нержавеющей стали, химически стойкой резины и фторопласта. Конструкция исключает появление пузырьков воздуха в нагнетаемой струе, что обеспечивает гарантированное качество дезинфекции и стерилизации каналов эндоскопа.

Технические характеристики установки


- ✦ Установка "УДЭ", укомплектованная набором адаптеров, предназначена для мойки, дезинфекции и стерилизации наружных поверхностей, клапанов управления и функциональных каналов гибких волоконных эндоскопов всех видов полностью и неполностью погружаемых.
- ✦ Установка "УДЭ" гарантирует безукоризненное качество обработки эндоскопов и полностью исключает инфицирование пациентов и медицинского персонала.
- ✦ Для мойки, дезинфекции и стерилизации могут использоваться любые разрешенные средства: хлоргексидина биглюконат, этиловый спирт, глутаровый альдегид, перекись водорода, Сайдекс и др.
- ✦ Установка "УДЭ" представляет собой легкую, мобильную платформу с расположенными на ней узлами и технологическими приспособлениями.
- ✦ Габаритные размеры, мм 1040 x 550 x 1000.
Объем ванны для дезраствора не более 5л.

Система фильтрации



✦ Система фильтрации технологических растворов двухступенчатая. Фильтры выполнены из титановой сетки с размерами ячеек 0,5 и 0,01 мм. Они надежно защищают функциональные каналы эндоскопа от засорения белковыми остатками, солями и т.д.

Кронштейн

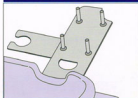

✦ Кронштейн установки обеспечивает надежное фиксирование эндоскопа и плавный переход его погружаемой части в анатомическую ванну.

Установка для дезинфекции эндоскопов КРОНТ-УДЭ (устаревшая модель)

Новую модель можно заказать через сайт www.medkr.ru или по тел. (495) 626-57-89