

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ КМС-01-«МСК» (МСК-203)
Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Кушетка медицинская смотровая (далее по тексту — кушетка) предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах.
- 1.2. Кушетки изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.1.1. Габаритные размеры указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Габаритные размеры, мм, ±5 мм	Значение
Длина	1950
Ширина	650
Высота	550

- 2.1.2. Масса не более 25 кг.
- 2.2. Характеристики:
- 2.2.1. Кушетка выдерживает номинальную нагрузку массой не более 130 кг.
- 2.2.3. Лежак кушетки состоит из двух секций - подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 45 градусов.
- 2.2.4. Подголовник и ложе изготовлены из фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винилискожей по ТУ 8714-095-05790484, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
- 2.2.5. Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.
- 2.2.6. Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДЛИАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- 2.2.7. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.
- 2.2.8. Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
- 2.2.9. Наружные поверхности кушетки устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.
- 2.2.10. Средний срок службы кушетки до списания не менее 8 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. Комплект поставки изделия « Кушетка медицинская смотровая » КМС-01-«МСК»:
- | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| лежак с рамой | -1 шт. | шайба | - 6 шт. |
| стойка | - 2 шт. | паспорт | -1 шт. |
| стяжка | - 1 шт. | | |
| болт М10х45 | -6 шт. | | |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 1.1. Кушетка состоит из каркаса, ложа, подголовника.
- 1.2. Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения.
- 1.3. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0 до 45 градусов.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. К сборке и эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт, конструкцию изделия и правила его эксплуатации .

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 3.1. После транспортирования кушетки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 3.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия .
- 3.3. Проверить комплектность.
- 3.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 4.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 4.2. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушеток .

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Кушетки в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.
- 6.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кушетки в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка медицинская КМС - 01 - «МСК» (МСК-203) _

Инструкция по сборке медицинской смотровой КМС -01-«МСЖ»

1. Соединить болтами раму и стойки, при этом упор необходимо вставить в ушко на левой стойке.
2. Прикрепить болтами стяжку к стойкам,

