


Заказать защитные перчатки ПРЗ-«Р-К» можно на сайте компании ООО Медремкомплект www.medrk.ru

Средства индивидуальной защиты



Стоматологический фартук

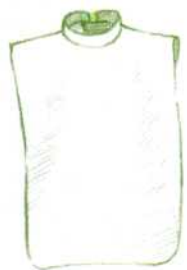


Пелерина



Шапочка




Воротник

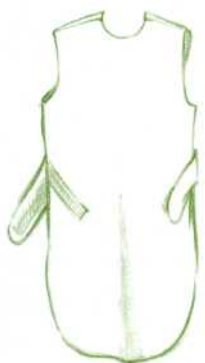

Фартук односторонний



Фартук двусторонний

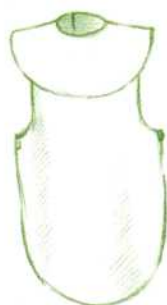

Фартук детский



Юбка



Передник



Юбка



ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПРЗ-«Р-К»

ПАСПОРТ КАГД 38641.007.007.00 ПС

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПРЗ-«Р-К»

ПАСПОРТ КАГД 38641.007.007.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. **Наименование:** Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К».
- 1.2. **Ваш поставщик:** 000 «Медремкомплект».
- 1.3. **Назначение:** Изделие предназначено для защиты кистей рук и запястий, нижней половины предплечья персонала от рентгеновского излучения при проведении рентгенографии, урографии.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитный материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее: при $U = 100$ кВ 0,25 мм Рь
- 2.2. Масса изделия не более 440 г.
- 2.3. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387- 16-89.
- 2.4. Средний срок службы 5 лет.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К» № XXXXXX соответствуют техническим условиям ТУ 9452-007-46782692-2001 и признаны годными к эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перчатки защитные ПРЗ-«Р-К» Паспорт КАГД 38641.007.007.00 ПС

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Во избежание контакта рук с рентгенозащитный материалом необходимо предварительно на руки рентгенолога надеть хлопчатобумажные перчатки.
- 5.2. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03.
- 5.3. Климатические условия эксплуатации от +10°C до +35°C.
- 5.4. Санитарная обработка производится протиранием наружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Салфетка должна быть отжата.
- 5.5. Утилизация изделий, отслуживших свой срок, на завершающей стадии не может быть возложена на завод-изготовитель.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий в течение всего срока службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, наличии маркировки и паспорта.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 6.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 6.4. Периодическая проверка защитных свойств производится не реже 1 раза в 2 года службой радиационной безопасности или организацией, аккредитованной в установленном порядке и имеющей лицензию на проведение этих работ.
- 6.5. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.
- 6.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.
- 6.7. **Условия хранения:** Хранение и транспортирование изделий в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.