

**Заказать стоматологические наконечники можно
на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrsk.ru**

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОРНЫЙ

НУо-40 - «Сапфир»

НУо-40 РУ № 29/13091002/4841-03 от 16.01.2003 год

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Наконечники стоматологические микромоторные НПо-40- «Сапфир». НУо-40-«Сапфир» (с внутренним охлаждением) и НП- 40-«Сапфир». НУ-40-«Сапфир» (без системы охлаждения) предназначены для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 2,35 мм и передачи им вращения от микромоторов с частотой вращения до 40000 об./мин. Область применения терапевтическая и ортопедическая стоматология. Наконечники предназначены для условий эксплуатации при температуре от пл. 10 гр. до пл. 35 гр. С и относительной влажности 80 проц. при 25 гр. С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Частота вращения на входе наконечника, об./мин. — 40000
- 2.2. Передаваемый вращающий момент, кгс см—0,7
- 2.3. Средняя наработка на отказ, ч не менее:
для прямых наконечников - 500
для угловых наконечников —300
- 2.4. Средний срок службы, год, не менее — 2
- 2.5. Осевое усилие на инструмент, кг, не более —3
- 2.6. Масса наконечника, кг, не более — 0.06

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наконечник НПо-40-«Сапфир», НУо-40-«Сапфир», НП-40-«Сапфир», НУ-40-«Сапфир».

Инструменты и принадлежности:

Мандрен — 1 шт.

Замок — 1 шт.

Эксплуатационная документация:

Паспорт 1 шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Работать наконечником при частоте вращения привода более 667 с-1 (40000 об/мин) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
- 4.2. Пользоваться наконечником при открытом зажимном устройстве ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
- 4.3. Прикладывать нагрузку свыше 30Н (3 кгс) к режущему инструменту НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

**Заказать стоматологические наконечники можно
на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru**

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 4.1. Вскрыть первичную упаковку при получении наконечника и протереть наружные поверхности изделий сухой чистой марлей.
- 4.2. Закрепить в наконечнике рабочий инструмент.
- 4.3. Смазать наконечник путем закапывания 8—10 капель путем индустриального И-5А в отверстие со стороны хвостовика, подсоединить наконечник к микромотору и проверить работу наконечника на микромоторе.
- 5.4. При необходимости простерилизовать наконечник в паровом стерилизаторе 134 гр. С при давлении МПа (2,2 кгс/см²) в течение 20 мин.
- 5.5. **ВНИМАНИЕ!** Включать наконечники прямые без инструмента **ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Наконечники в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой от -50 гр. до 40 гр. С и влажности воздуха не более 80 проц. при 15 гр. С.
- 6.2. Рекомендуется в процессе эксплуатации хранить наконечники при открытом зажимном устройстве или со вставленным рабочим инструментом.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наконечник НПо-40-«Сапфир», НУо-40-«Сапфир», НП-40- «Сапфир», НУ-40-«Сапфир» Заводской номерXXXX
Соответствует ТУ 9431 —002—07509847—2003 и признан годным для эксплуатации.

**Заказать стоматологические наконечники можно
на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru**

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 1.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу наконечника при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
 - 1.2. Гарантийный срок эксплуатации наконечников — 12 месяцев со дня продажи.
 - 1.3. Потребителю запрещается производить разборку и ремонт наконечников в период гарантийного срока эксплуатации.
 - 1.4. Предприятие-изготовитель выдает гарантийный талон на проведение ремонта в течение гарантийного срока.
- В случае невозможности устранения неисправностей силами мастерских ремонт производится заводом.
- 1.5. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации наконечники в гарантийный ремонт не принимаются.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 2.1. В случае отказа наконечника или его неисправности в период действия гарантийных свидетельств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец наконечника должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы —заявку на ремонт (замену) с указанием адреса и номера телефона, дефектную ведомость и гарантийный талон.