

Руководство по эксплуатации



Укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения УКТП-01 «ЕЛАТ»

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) совмещено с паспортом и является эксплуатационным документом на "Укладку-контейнер для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения УКТП-01 «ЕЛАТ»".

Перед началом эксплуатации необходимо изучить и при работе соблюдать все правила и рекомендации, приведенные в РЭ.

Специальной подготовки обслуживающего персонала не требуется.

При покупке необходимо проверить комплектность, отсутствие механических повреждений и убедиться, что в РЭ поставлены штамп ОТК, дата упаковки.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Изделие предназначено для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.

Изделие поставляется в двух вариантах исполнения.

1.2 Условия эксплуатации

1.2.1 Укладка-контейнер эксплуатируется в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 35 °С;
- влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 25 °С, не более 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

1.1 Основные параметры

1.3.1 Габаритные размеры укладки-контейнера - 350x225x270 мм

1.3.2 Масса контейнера, не более - 2,0 кг.

1.3.3 Максимальная рабочая нагрузка не более 6,0 кг.

1.3.4 Максимальное количество переносимых одновременно пробирок

- вариант 1—40 шт.

- вариант 2-80 шт.

1.1 Характеристики

1.4.1 Укладка-контейнер устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств по МУ 287-113 МЗ РФ при температуре не более 50 °С.

1.4.2 Укладка-контейнер изготовлена из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных материалов: полипропилен УПМ-0508 ГОСТ 28250, полиэтилен 210 ГОСТ 16338 и термоэластопласта ELASTRON G 202.002.

1.4.3 Наружные и внутренние поверхности укладки-контейнера устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ 287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 26644 и 1% раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16.

1.4.4 Средний срок службы укладки-контейнера не менее двух лет с момента её изготовления.

**Заказать укладку-контейнер УКТП-01
можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru**

2. Комплектность
В состав укладки-контейнера входят:

	Вариант 1 (рис. 1)	Вариант 2 (рис. 2)
1. Крышка	1 шт.	1 шт.
2. Корпус	1 шт.	1 шт.
3. Подставка для пробирок	1 шт.	2 шт.
4. Корпус с вкладышами	1 шт.	-
5. Фиксатор	2 шт.	2 шт.

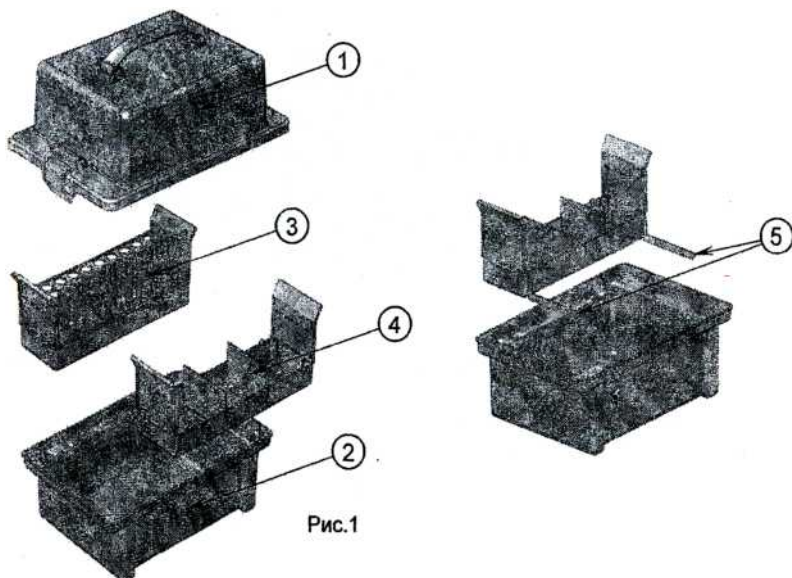


Рис.1

Примечание: При транспортировке в корпусе контейнера только подставки для пробирок или только корпуса с вкладышами используются два фиксатора.


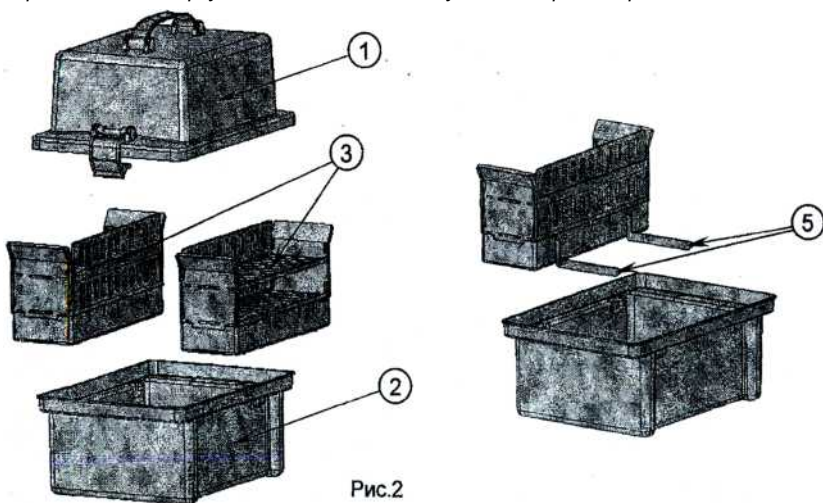


Рис.2

Порядок сборки показан на рисунке 3

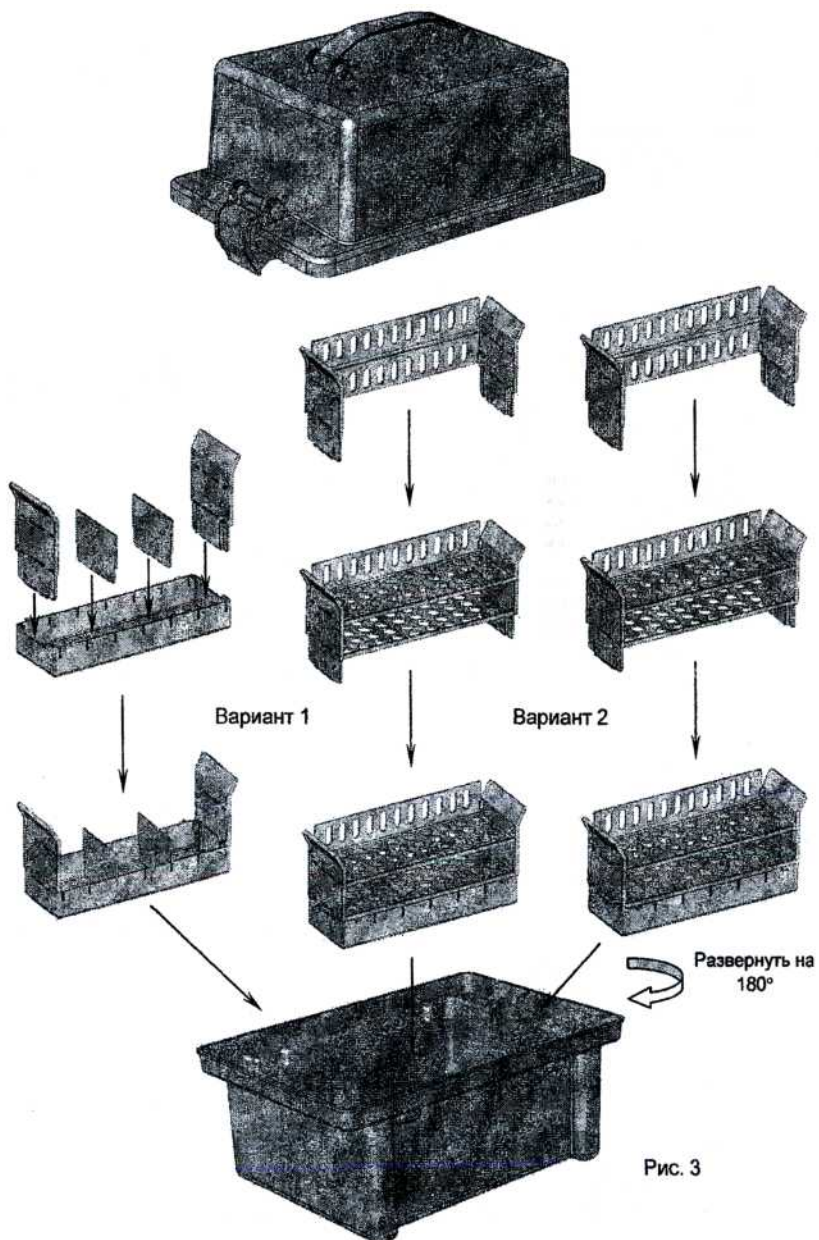

**Заказать укладку-контейнер УКТП-01
можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru**

3. Меры безопасности

3.1 К использованию укладки-контейнера приступайте после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

3.2 Оберегайте укладку-контейнер от ударов, от контакта с открытым огнем.

3.3 Температура воздействия на поверхности должна быть не выше 75 °С.

4. Подготовка к работе и сборке

4.1 После хранения укладки-контейнера в холодном помещении или перевозки его при температуре ниже +10 °С перед эксплуатацией дать ей прогреться до комнатной температуры в течение 30 минут.

4.2 После прогрева при комнатной температуре можно приступить к эксплуатации укладки-контейнера и ее использованию.

4.3 Дезинфекцию укладки-контейнера проводить в соответствии с рекомендациями МУ 287-113 МЗ РФ от 30.12.98.

5. Хранение и транспортирование

5.1 Хранение контейнера осуществляется в упаковке изготовителя при условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);
- отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

3.1 Контейнеры в упаковке изготовителя могут транспортироваться железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок.

3.2 Условия транспортирования:

- температура окружающей среды от плюс 50 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

3.1 При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

4. Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества контейнера требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем РЭ.

4.2 гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи (но не более 18 месяцев со дня изготовления).

5. Свидетельство о приемке

Укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения

УКТП-01 «ЕЛАТ» (вариант 1)

изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942819.102 ТУ и признана годной для эксплуатации.