

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ
МОДЕЛЬ Professional MX (Professional 1+, модификация X-рама)

П А С П О Р Т

1. Выбор места и установка.

Не устанавливайте массажный стол в местах, где имеется избыточная влажность, в пыльных местах, в местах прямого попадания солнечных лучей, возле обогревательных приборов и каминов. Для долговечной работы массажного стола важно, что бы он находился на ровной поверхности. После установки на место отрегулируйте его положение путем вращением регулировочных опор, находящихся в ножках. Не устанавливайте массажный стол на толстом ковре. Массажный стол обладает довольно большим весом, передвигайте его осторожно и только при уверенности в своих силах.

2. Подключение к электросети.

Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- напряжение сети соответствует данным, указанным на электроприводе - 220-240 V, 50-60 HZ, 2,8 A;
- заземляющий контакт электрической розетки электрически соединен с заземляющим проводом или с нулевым проводом питающего кабеля электрической сети;
- розетка и вилка должна быть одного типа, если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить.

3. Обслуживание и уход.

Покрытие из кожзаменителя и раму мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства в теплой воде. Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлор и аммиак содержащие вещества. Если вы не собираетесь использовать массажный стол продолжительное время, вымойте его, просушите и накройте непрозрачной пленкой. Хранить стол необходимо в месте, где нет прямых солнечных лучей, обогревательных приборов, нормальная влажность и следите, чтобы на поверхность не устанавливали предметы, которые продавят или повредят покрытие из кожзаменителя.

4. Технические характеристики.

- высота ложа регулируется электроприводом, диапазон 42-92 см, ширина ложа 60 см;
- две пары подлокотников;
- ручная регулировка угла излома грудного и угла наклона ножного отдела ложа стола;
- угол наклона лицевой части регулируется помповым амортизатором;
- рама на колесиках;
- ножки стола имеют ручную регулировку от раскачивания массажного стола из-за неровных полов;
- держатель для рулона бумаги;
- подключение к электросети: 220-240 V, 50-60 HZ, 2,8 A, скорость движения/время: 0,8 м/мин/14 сек.

5. Гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок 24 месяца начиная с момента продажи. Гарантийный талон прилагается.

6. Информация о сертификации продукции.

Профессиональный массажный стол модель "Professional MX" ("Professional 1+" X-рама) сертифицирован органом сертификации ООО "РСТ ЭКСПЕРТ".

- Сертификат соответствия: № РОСС FI.AB59.H00539
- Сертификат соответствия выдан: 20.07.2011
- Сертификат соответствия действителен до: 19.07.2014

Профессиональный массажный стол модель "Professional MX" ("Professional 1+" X-рама) соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НА МАССАЖНЫЙ СТОЛ - Professional MX (Professional 1+, X-рама)

КОМПАНИЯ «FYSIOTECH» НАСТОЯЩИМ ГАРАНТИРУЕТ,

что в случае возникновения неполадок в конструкции массажного стола в течение гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении дефектов сборки, производитель через представительство бесплатно обеспечит замену деталей, необходимых для устранения дефекта.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации электропривода – 24 месяца.

Гарантия действительна при наличии гарантийного талона.

В случае отсутствия гарантийного талона представительство осуществляет гарантийные обязательства на свое усмотрение.

Гарантийное оборудование принимается в ремонт или на замену только в оригинальной упаковке и при наличии всех аксессуаров.

Послегарантийный ремонт осуществляется за счет покупателя.

Транспортировка к месту и от места ремонта производится покупателем.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на случаи, вызванные нарушением правил эксплуатации, в том числе при наличии механических повреждений, включая вмятины и царапины;
- на случаи поломки электропривода из-за подключения питающего напряжения, не соответствующего техническим условиям;
- на мягкие части и покрытие из кожзаменителя;
- на электрические провода и вилку включения электропитания;
- и прекращает своё действие в полном объеме при не согласованной с представительством, самостоятельной попытке вскрытия и/или ремонта, а также нарушение пломб (при их наличии).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ МАССАЖНОГО СТОЛА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Массажный стол полностью исправен. Замечаний нет.

Гарантийный талон получен. С инструкцией по эксплуатации и правилами предоставления гарантии ознакомлен. _____

Заказать Массажный стол Professional MX можно на сайте
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения и поломки частей массажного стола, перед включением электропривода полностью освободите массажный стол от упаковки.

Запрещено пользоваться лицам моложе 18 лет.

Выбор места и установка.

Не устанавливайте массажный стол в местах, где имеется избыточная влажность, в пыльных местах, в местах прямого попадания солнечных лучей, возле обогревательных приборов и каминов.

Для долговечной работы массажного стола важно, что бы он находился на ровной поверхности. После установки на место отрегулируйте его положение путем вращением регулировочных опор, находящихся в ножках.

Не устанавливайте массажный стол на толстом ковре.

Массажный стол обладает довольно большим весом, передвигайте его осторожно и только при уверенности в своих силах.

При наличии колесиков катите столы.

Стол с колесиками не предназначены для перевозки пациентов.

Подключение к электросети.

Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- напряжение сети соответствует данным, указанным на электроприводе - 220-240 V, 50-60 HZ, 2,8 A;
- заземляющий контакт электрической розетки электрически соединен с заземляющим проводом или с нулевым проводом питающего кабеля электрической сети;
- розетка и вилка должна быть одного типа, если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить.

Не пользуйтесь удлинителями и тройниками. Если Вы все-таки решили использовать удлинитель, то вилка и розетка удлинителя должны иметь заземляющие лепестки и соответствовать типу вилки.

Обеспечьте беспрепятственный доступ к розетке электропитания с тем, чтобы вы в любой момент могли отсоединить шнур электропитания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Обслуживание и уход.

При проведении обслуживания или мойке обязательно выдерните шнур питания из розетки.

Покрытие из кожзаменителя, раму, электропривод, переключатели и электрические провода мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства в теплой воде.

Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлоро- и аммиакосодержащие вещества.

Пыль может скапливаться в переключателе и на электроприводе. Осторожно пропылесосьте их или протрите тряпкой.

Если вы не собираетесь использовать массажный стол продолжительное время, вымойте его, просушите, опустите до минимальной высоты, накройте непрозрачной пленкой.

Хранить стол необходимо в месте, где нет прямых солнечных лучей, обогревательных приборов, нормальная влажность и следите, чтобы на поверхность не устанавливали предметы, которые продавят или повредят покрытие из кожзаменителя.