

Заказать инструменты Surgicon можно на сайте
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

SURGICON
ULTIMATE CHOICE OF QUALITY BUYERS
SERVING SINCE 1908



SURGICON GUARANTEE

*SURGICON INSTRUMENTS ARE PRODUCED OF
FINE MATERIAL AND WORKMANSHIP
SURGICON GUARANTEES ITS INSTRUMENTS
AGAINST RUST AND WORKMANSHIP FOR ONE
YEAR. IF ANY SURGICON'S INSTRUMENT
NEEDS SERVICE, RETURN TO AUTHORIZED
SURGICON DEALER. MINOR SERVICE
CHARGES WILL BE MADE AGAINST ITS REPAIR.
IN CASE OF MISUSE GUARANTEE DOES NOT
APPLY.*



ISO 9001:2008
ISO 13485:2003
USFDA QSR



Заказать инструменты Surgicon можно на сайте
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

surgicon

ULTIMATE CHOICE OF QUALITY BUYERS SERVING SINCE
1908



surgicon Instruments

J-12-003

**BUCK PERCUSSION
HAMMER 18 CM**

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА SURGICON

Отличительной особенностью инструментов Surgicon является высокое качество материала и изготовления.

На все инструменты Surgicon распространяется гарантия качества и защиты от коррозии. В случае необходимости сервисного обслуживания инструмента обращайтесь к официальным дилерам компании Surgicon.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

1. Точно следуйте инструкциям для увеличения срока службы лучшего использования инструментов.
2. Стерилизуйте перед использованием.
3. После использования чистите, смазывайте и стерилизуйте инструменты.
4. Тонкие инструменты могут быть очищены ультразвуком.
5. Тщательно и осторожно полощите инструменты после чистки. По возможности используйте деминерализованную воду.
6. Хорошо просушите после полоскания.
7. Инструменты с сочленениями, кремальерами или резьбовыми соединениями смазывайте составами на основе парафинового масла.
8. Перед стерилизацией закрывайте кремальеру только на одно деление.
9. Обработка в автоклаве производится насыщенным паром при $t + 134^{\circ}\text{C}$.
10. Инструменты, подвергшиеся коррозии, должны быть немедленно изъяты из использования.