

Приобрести медицинский инструмент можно на сайте
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru



**J-22-041 OPERATING
SCISSORS SH/SH CVD
14.5CM**



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА SURGICON Отличительной особенностью инструментов Surgicon является высокое качество материала и изготовления. На все инструменты Surgicon распространяется гарантия качества и защиты от коррозии. В случае необходимости сервисного обслуживания инструмента обращайтесь к официальным дилерам компании Surgicon.

SURGICON GUARANTEE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

1. Точно следуйте инструкциям для увеличения срока службы лучшего использования инструментов.
2. Стерилизуйте перед использованием.
3. После использования чистите, смазывайте и стерилизуйте инструменты.
4. Тонкие инструменты могут быть очищены ультразвуком.
5. Тщательно и осторожно полощите инструменты после чистки. По возможности используйте деминерализованную воду.
6. Хорошо просушите после полоскания.
7. Инструменты с сочленениями, кремальерами или резьбовыми соединениями смазывайте составами на

основе парафинового масла.

8. Перед стерилизацией закрывайте кремальеру только на одно деление.
9. Обработка в автоклаве производится насыщенным паром при $t + 134^{\circ}\text{C}$.
10. Инструменты, подвергшиеся коррозии, должны быть немедленно изъяты из использования.

SURGICON INSTRUMENTS ARE PRODUCED OF FINE MATERIAL AND WORKMANSHIP. SURGICON GUARANTEES ITS INSTRUMENTS AGAINST RUST AND WORKMANSHIP FOR ONE YEAR. IF ANY SURGICON'S INSTRUMENT NEEDS SERVICE, RETURN TO AUTHORIZED SURGICON DEALER. MINOR SERVICE CHARGES WILL BE MADE AGAINST ITS REPAIR. IN CASE OF MISUSE GUARANTEE DOES NOT APPLY.



**ISO 9001:2008
ISO 13485:2003
USFDA QSR**

