

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)



## **Вертикализатор-Стойка**

**Этикетка.  
СН - 38.02 ЭТ**

1 Вертикализатор - стойка СН-38.02. позволяет вертикализировать не ходячих детей и проводить с ними различные занятия как групповые, так и индивидуальные.

2 Габаритные размеры и масса должны быть не более размеров, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

№ п.п.	Параметры	Значения
1	Длина/мм /	860
2	Ширина /мм /	610
3	Высота /мм /	1490
4	Масса /кг /	20

3 Допускается дезинфекция по ГОСТ 50444 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16.

4 Средний срок службы до списания - не менее 7 лет.

За предельное состояние принимают такое состояние вертикализаторов, при котором годовая стоимость ремонтов для восстановления работоспособности достигает 60% стоимости нового изделия

5 Комплект поставки должен соответствовать указанному в Таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование	Количество
1	Вертикализатор	1
2	Пояс для крепления грудного отдела	1
3	Упор спинной	1
4	Упор боковой	2
4	Упор для коленей	1
5	Упоры для стоп	5
6	Этикетка СН-38.02.00	1

Примечание: По согласованию с заказчиком комплектность может быть изменена.

6 Вертикализатор состоит из основания (1) на колесах, на котором крепятся вертикальные стойки (2), На стойках крепятся регулируемые по высоте пояса для крепления грудного отдела (3), упор для спины (4), с регулируемыми по ширине боковыми упорами (5), упор для колен (6) на основании имеются регулируемые упоры для стоп (7,8)

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

## 7 Свидетельство о приемке

Вертикализатор-стойка СН-38.02 02 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.

## 8 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, возникшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производится изготовителем

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

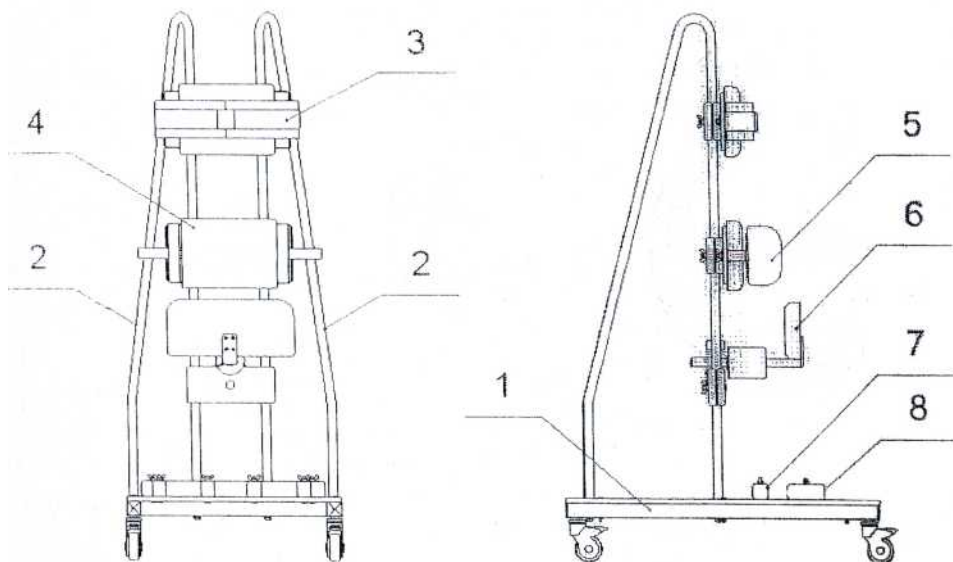


Рис 1

Параметры	СН-38.02.02
Длина /мм /	860
Ширина /мм /	610
Высота /мм/	1490