


## Инструкция по эксплуатации сумки-холодильника с электронным

1. Заложите в сумку подготовленные пакеты хладагента и транспортируемый объект.
2. При первом включении индикатора не забудьте подключить батарею «крона» к колодке, находящейся в кармане внешнего клапана сумки.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП, **изм. порог**». После чего индикатор выйдет из спящего режима и на экране кратковременно появится надпись «циклов: XXXX» (где XXXX - количество запусков цикла перевозки), а затем появится экран, на котором отображается температурный порог для цикла и текущая температура в сумке.
4. Для контроля режима транспортировки при помощи кнопки «СТАРТ/СТОП, **изм. порог**» выберите допустимый верхний порог температуры перевозки (от 4 до 10 градусов). Если в течение транспортировки температура в сумке превысит заданную температуру, начнется отсчет времени перегрева.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ/СТОП, **изм. порог**», пока не появится надпись «Цикл запущен»
6. На дисплее, отобразится экран, на котором будет отображен порог, текущая температура в сумке и стрелки вниз на месте отображения времени и времени перегрева. В течение нескольких минут (зависит от объема и количества пакетов с хладагентом) прибор войдет в режим контроля температуры (вместо стрелок начнется отсчет времени). Если прибор не выходит на заданный порог в течение 40 минут, он переходит в спящий режим.

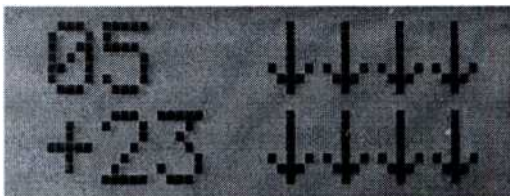

7. При необходимости отменить старт цикла, нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП, **изм. порог**»
8. В процессе перевозки на экране отображаются следующие значения:
  - порог - верхняя допустимая температура для перевозимого объекта
  - в сумке - текущая температура в сумке
  - общее - общее время транспортировки
  - нарушение - суммарное время нарушения температурного режима
9. После завершения транспортировки нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ/СТОП, **изм. порог**» пока программа не выйдет из цикла (цикл завершается автоматически, если время перевозки достигло 16 часов или если время перегрева превысило 8 часов). Цикл завершился и вся информация сохранилась.
10. Нажмите кнопку «ПАМЯТЬ». На экране отобразится вся информация по последнему запущенному циклу.