

## Основные параметры и характеристики

Наименование	Основные размеры
Размер основания по опорам, мм.	430±5
Размер сидения, мм.	Ф370±5
Высота сидения от пола наименьшая, не более, мм.	440±5
Высота сидения от пола наибольшая, не более, мм.	640±5
Предельная рабочая нагрузка, кг.	100
Масса стула не более, кг.	6.5

### Назначение изделия

Табурет предназначен для сидения и может быть использован в общественных помещениях, предприятиях бытового обслуживания, гостиницах, лечебных учреждениях, библиотеках, административных помещениях, залах ожидания транспортных учреждений, общежитиях и в быту.

### Устройство изделия

Табурет состоит из основания и стойки соединённых между собой винтовой парой с прямоугольной резьбой 36х6 мм и подвижного кольца Ф390мм. Основание выполнено из пяти труб 25х25х1.5мм, трубы Ф48х3.5мм и гайки. Стойка состоит из металлического каркаса и мягкого элемента — сидения. Каркас выполнен из трубы 20х20х1.2мм, и винта из трубы Ф36х5. Мягкий элемент состоит из основы — фанера S8мм, настилочного материала — поролон S18...20мм, облицовочного материала — ткань или винилкожа. Облицовочный материал крепится к основе скобами. Крепление сидения к каркасу — винтами М6. Покрытие металлических частей стула — краска порошковая термостойкая. Открытые концы труб металлокаркаса закрыты декоративными заглушками.

### Технические требования

Табурет должен соответствовать требованиям ГОСТ16371 и настоящих технических условий и комплекту чертежей. Наружные поверхности стула должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-69 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-88 или 1% раствором хлорамина.

### Упаковка

Табурет должен быть упакован в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75 или гофрокартон по ГОСТ 7376-89 и обвязан упаковочной пленкой ГОСТ17308-88.

### Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия осуществляется транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве, исключая смещение в процессе перевозки.

При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

### Указания по эксплуатации

Перед началом эксплуатации следует:

- удалить упаковку
- установить подвижное кольцо на необходимую высоту и зафиксировать его стопорным винтом
- при подъёме сидения на максимальную высоту не допускать захода нижнего конца винта в гайку.

*Табурет поставляется в собранном виде. Перестановка основания или стойки с одного стула на другой недопустима*

### Сведения о сертификации

Указанное изделие в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включено и обязательной сертификации не подлежит.

### Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует надёжную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличия оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, не ухудшая при этом эксплуатационных характеристик. Фирма производитель — ООО «СТАС-ЛЕГМА»

Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи.

При этом гарантия: На изделие 12 месяцев

### Гарантийные обязательства поставщика.

1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.
2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.
3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
  - неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствия;
  - нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании);
  - наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.);
  - наличие внутри изделия посторонних предметов;
  - наличие признаков самостоятельного ремонта;
  - наличие изменений устройства изделий.
4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.
5. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий
6. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.
7. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".