

**Данный товар можно заказать на сайте [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)**

**Носилки мягкие**

**ТУ 9451-002-38140643-2012**

*Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/1076 от 22.08.2013г.*



## **ЭТИКЕТКА**

### **1 Назначение и технические данные**

- 1.1 Носилки мягкие «Медтехника» (в дальнейшем – носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда обычными носилками воспользоваться неудобно или невозможно. В частности мягкие носилки могут использоваться при транспортировании людей по узким лестницам и извилистым проходам.
- 1.2 Основные размеры: длина  $2100 \pm 50$  мм, ширина  $850 \pm 50$  мм. Имеют четыре пары ручек.
- 1.3 Носилки выдерживают распределённый по площади груз массой  $150 \pm 5$  кг.

### **2 Комплектность**

2.1 В комплекты НМ-01, НМ-02 и НМ-03 входят: носилки мягкие – 1шт, сумка-чехол, этикетка – 1шт. По заказу покупателя носилки дополнительно комплектуются фиксирующими ремнями (исполнение НМ-02); фиксирующими ремнями и плечевыми ремнями для переноски пострадавшего в положении сидя (исполнение НМ-03).

### **3 Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция**

- 3.1 Уложить транспортируемого человека на носилки.
- 3.2 Два или четыре человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

- 3.3 Носилки изготовлены из материалов безопасных при контакте с открытыми участками кожи транспортируемых людей.
- 3.4 Обеззараживание рабочей поверхности носилок производится 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, типа «Лотос». Время дезинфицирующей выдержки – 60 минут. Обеззараживание производится из расчёта 700мл/ кв.м.
- 3.5 При видимых обильных загрязнениях носилок кровью - обеззараживание производится двукратным протиранием носилок двумя салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором. После выдержки по п.3.4 дезинфицирующий раствор удаляется с поверхности носилок путём протирания салфеткой, смоченной водой. После чего носилки протираются сухой салфеткой.
- 3.6 Носилки могут подвергаться стирке в стиральной машине с использованием режимов стирки, определённых для синтетических тканей.

#### 4 Срок эксплуатации

16993

4.1 Средний срок службы носилок – 2 года.

4.2

носилок -12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок эксплуатации

4.3 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.

Исполнения: **НМ-01**    **НМ-02** (с фиксирующими ремнями)    **НМ-03** (с фиксирующими и плечевыми ремнями.)

Штамп ОТК

Ф.эт. от 20.03.2015



Дата выпуска: -- СЕН 2015

Дата продажи: \_\_\_\_\_